

➤ Hemorepair

... Immunologischer Nachweis von okkultem Blut im Stuhl

Patienteninformation

Jährlich sterben in Deutschland ca. 35.000 Menschen an Darmkrebs.

Im gleichen Zeitraum gibt es ca. 57.000 Neuerkrankungen.

Jeder kann betroffen sein, und jeder kann etwas dagegen tun.



Hier greift die Vorsorgeuntersuchung.

Mit diesem Informationsblatt bitten wir um Ihre Aufmerksamkeit, damit Sie sehen wie wichtig und einfach es ist, sich testen zu lassen.

Was bringt die Vorsorgeuntersuchung?

- Schnelle Information und Sicherheit.
- Frühzeitig erkannter Darmkrebs ist fast immer heilbar.
- Durch den Nachweis von verstecktem (okkultem) Blut im Stuhl kann Darmkrebs rechtzeitig erkannt werden.

Anleitung:

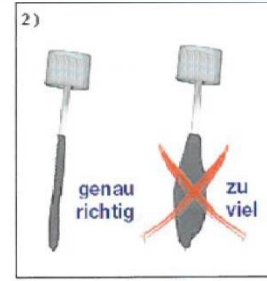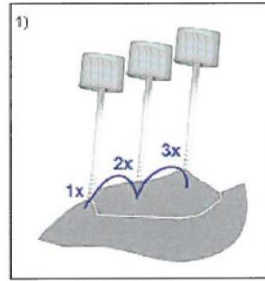

Zur Probennahme benutzen Sie möglichst einen Flachspüler oder fangen Sie einen Teil Ihres Stuhls mit Toilettenpapier oder einem Stuhlfänger auf:

1. Schraubkappe mit Probenstäbchen aufdrehen und herausnehmen.
2. Mit dem Probenstäbchen 3 x an verschiedenen Stellen der Stuhlprobe hineinstecken, so dass Probenmaterial an den spiralförmigen Einkerbungen des Probestäbchens hängen bleibt (nicht zu viel, siehe Abbildung 2)
Es reichen sehr geringe, fast unsichtbare Mengen aus
3. Das Probenstäbchen wieder in das Probenröhrchen zurückführen, die Schraubkappe fest verschließen, anschließend das Röhrchen schütteln.
4. Beste Ergebnisse werden erzielt, wenn die Probe innerhalb von 24 Stunden getestet wird. Die Probe kann bis zu 14 Tage bei 2-8 °C gelagert werden.

Vorteile dieses Immunologischen Tests:

- Mehr Sicherheit.
- Meist reicht ein Test pro Jahr.
- Es muss keine Diät mehr eingehalten werden.
- Das Ergebnis liegt nach wenigen Minuten vor.
- Durch diesen Test werden auch sehr geringe Mengen von Blut nachgewiesen.
- Tierisches Blut z.B. von Fleisch stört diesen Test nicht.
- Medikamente müssen nicht abgesetzt werden.


Eine Information von

Biorepair.com

www.biorepair.com

Was bedeutet ein positives Ergebnis?

- Blut im Stuhl muss nicht Darmkrebs bedeuten, es kann auch andere Ursachen (z.B. Hämorrhoiden) haben.
- Ist der Test positiv, müssen die Ursachen abgeklärt werden.
- Im Gespräch mit Ihrem Arzt werden weitere Maßnahmen besprochen. In Betracht kommt dann evtl. eine Darmspiegelung.

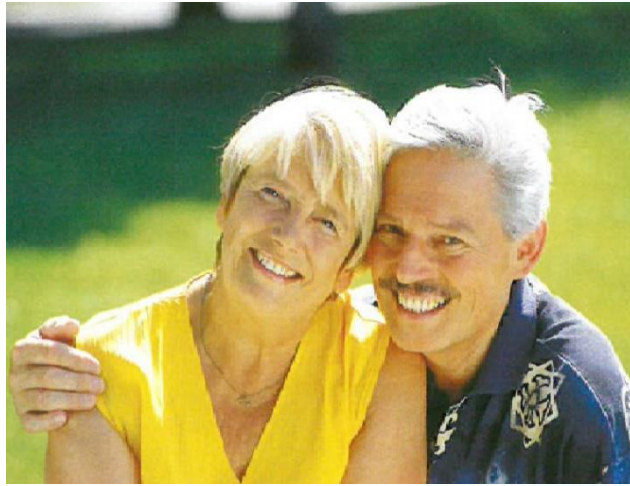

Informationen zur Darmspiegelung

- Eine Darmspiegelung ist heutzutage weit weniger unangenehm als früher.
- Durch moderne Technik und dünne flexible Instrumente ist die Untersuchung beim Spezialisten schnell und schmerzlos.

Ergebnisse der Darmspiegelung

- Durch die Darmspiegelung kann die Darmoberfläche genau untersucht werden, und so gutartige Veränderungen, wie Hämorrhoiden oder Darmpolypen erkannt und entfernt werden.

Ein gutes Gefühl

- Meist wird das Ergebnis dieser Untersuchung negativ sein.
- Sollte das Ergebnis positiv sein, wird in den meisten Fällen durch entsprechende Maßnahmen die Ursache entfernt und Sie sind wieder gesund.
- In jedem Fall wissen Sie, das Richtige für sich getan zu haben.
- Sprechen Sie mit uns!

Eine Information von

Biorepair.com

Informationen zur
Darmkrebsvorsorgeuntersuchung.

Immunologischer Nachweis von
okkultem Blut im Stuhl ohne Diät

Fühlen Sie sich auch gut?

Sie könnten trotzdem Darmkrebs haben, weil man ihn erst spürt, wenn es zu spät ist.

Wird er aber früh entdeckt, ist er zu 100% heilbar.

Es liegt an Ihnen – Machen Sie den ersten Schritt!

Praxisstempel

Ein gutes Gefühl – durch Vorsorge!